

転倒防止マット

膝関節症や片側半身マヒなどの立ち上がり補助に、
介助での立ち上がり補助のときに

足元のすべりをしっかりと防ぐ

立ち上がり補助マット

タイプ	商品コード	価格
携帯用	532-010	3,900円(税抜)
据置用	532-012	7,700円(税抜)



携帯用

据置用

ポイント

足元がすべらず、しっかりと


一人のときに



膝関節症や片側半身マヒの方など、足を踏ん張ったときに足がすべって、身体を支えられず、転倒することがあります。

立ち上がり補助マットを使うと、身体を支える側の足がすべらず、立ち上がりやすくなります。

介助のときに

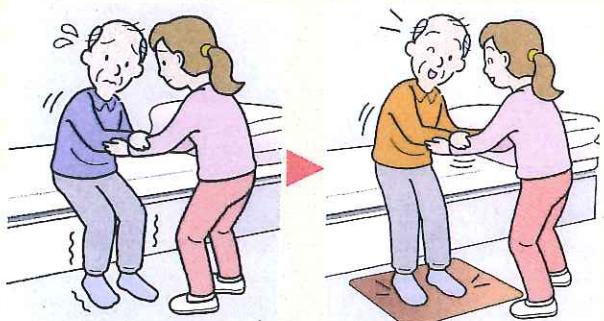

介助される側の足が不安だと、介助される側が余分な力をいれてしまって、上手く立てないことがあります。

立ち上がり補助マットを使うと、介助される側の足元をしっかりと支えるので、無理な力が入らず、楽に安心して立ち座りができます。

使用可能な場所

- 病院・介護施設内の床（塩ビフロアー）やフローリング、畳、じゅうたんなど
- 上記面で、ほこりや砂・水・油などの無い場所

使用できない場所

- 濡れたタイル・金属面、浴室の洗い場、浴槽の底、屋外の床面など
- ほこりや砂・水・油などがある場所
- 直射日光の当たる場所

商品サイズ（携帯用）幅38×奥行28×厚さ0.4cm
(据置用) 幅55×奥行38×厚さ0.4cm

商品重量（携帯用）約0.6kg
(据置用) 約1.1kg

材質（表裏面）オレフィン系エラストマー
(芯材) 合成ゴム

梱包入数5

色調 ブラウン

JAN (携帯用) 458365
(据置用) 458372

表面・裏面に特殊発泡素材を使用し、足元のすべりをしっかりと防ぎます。

病院・施設の床やご家庭のフローリング・畳・じゅうたんでも置くだけの簡単設置。

●ベッド



畳

●トイレ



塩ビフロアー

●車いす



フローリング

●椅子・ソファー



じゅうたん

転倒防止マット

立ち上がり補助マット取扱説明書

このたびは立ち上がり補助マットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。
 注意	誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）

 必ず実行していただく「強制」内容を  してはいけない「禁止」内容を 説明しています。

 警告	
	使用前にマットの破損や表裏面に汚れが付いてすべりやすくなっていないか確認すること 転倒し、けがの原因になります。
	足や靴下・スリッパ・靴などが濡れた状態で使用しないこと 転倒し、けがの原因になります。

 注意	
	マットを使用する前に、必ず床面の砂やほこり、水などを取り除くこと マットの裏面に砂やほこり・水などが付着すると、すべる原因になります。
	高温多湿の場所に長時間放置しないこと 変形やカビが発生する原因になります。
	マット表裏面に汚れた水などが付着し、すべりやすくなった場合は、速やかに使用を中止し、表裏面の汚れを洗い流し、乾燥させ使用すること 転倒し、けがの原因になります。
	ストーブなど、火の近くに置かないこと 変形や劣化、火災の原因になります。
	直射日光の当たる場所に設置したり、乾かしたりしないこと 変色や変形、劣化の原因になります。
	丸めたり、折り曲げたりしたまま長時間放置しないこと 変形の原因になります。
	洗濯機で洗ったり、乾燥機は使用しないこと 変形や劣化、破損の原因になります。
	お手入れのときは中性洗剤を使用し、塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クリゾール等は絶対に使用しないこと タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと 変形や劣化、破損の原因になります。

使いかた

携帯用 介助補助などで一時的に使用したい場合や外出先などで使用したいとき

据置用 一定の場所（ベッドやトイレ）に常時設置して使用したいとき

● 使用可能な場所

- ・病院・介護施設内の床（塩ビフロア）やフローリング、畳、じゅうたんなど
- ・上記床面で、ほこりや砂・水・油などの無い場所

● 使用できない場所

- ・濡れたタイル・金属面、浴室の洗い場、浴槽の底、屋外の床面など
- ・ほこりや砂・水・油などがある場所
- ・直射日光の当たる場所

● 使いかた

①ベッド・トイレ・椅子・車いすなどで、立ち座り動作を行う目的・場所で使用します。

②設置したい床面のほこりや砂・水などをきれいに取り除きます。

③黒色の面が床面に接するように設置します。

④表裏面が汚れたり、水が付いてすべりやすくなったりした場合は、お手入れの方法に従って汚れを洗い流し、乾燥させてから使用してください。（表裏面が堅くなったりすべりやすくなったりした場合は速やかに使用を中止し、新しいものを購入してください。）



※使用者の身体状況や動作状況によっては、マットのグリップ力が強く、つまづく恐れがあるので、十分注意すること


お手入れの方法

マットの表裏面が汚れたときは、中性洗剤を使用してやわらかいスポンジで水洗いしてください。

※乾燥は、マットが折れ曲がらないように平らな面に置き、日陰干しをしてください。




- ※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
- ※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
- ※洗濯機で洗ったり、乾燥機は使用しないこと
- 变形や劣化、破損の原因になります。

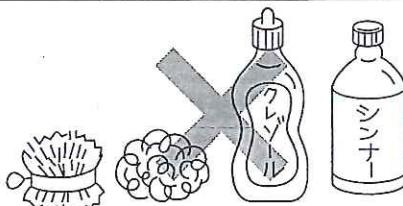


製品仕様

携帯用

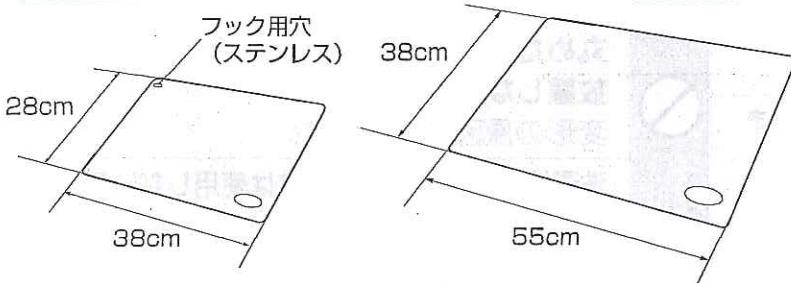

据置用

断面図

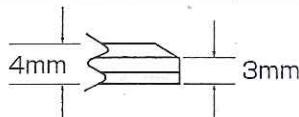

材質	表裏面：オレフィン系エラストマー 芯材：合成ゴム
サイズ	携帯用 幅38×奥行28×厚み0.4cm 据置用 幅55×奥行38×厚み0.4cm
重量	携帯用 0.6kg 据置用 1.1kg

● 製品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますので了承ください。

06.02

お客様ご相談窓口 フリーダイヤル 0120-86-7735
※月に数回お問い合わせ（受付時間）祝日以外の月～金 8:00～17:00



アロン化成株式会社

ライフ・サポート事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル4階 TEL(03)5420-1556
FAX(03)5420-7750

東京営業グループ ☎(03)5420-1562

大阪支店 ☎(06)6448-5127

名古屋支店 ☎(052)203-0396

福岡支店 ☎(092)741-1411

仙台支店 ☎(022)291-5477

広島支店 ☎(082)245-7100

札幌営業所 ☎(011)709-6011